



## TEST EMBARAZO HCG 10 MLU/ML EN SUERO, PLASMA Y ORINA, CASETE

24,60€ I.V.A. no incluido



Una prueba rápida de membrana para detección cualitativa de gonadotropina coriónica humana (HCG) en suero, plasma, u orina que ayuda en la detección temprana del embarazo.

Sensibilidad de 10mIU/ml.

Presentación: Caja 40 tests

Marca: Akratest

---

**SKU:** 265617FHCU20

**Categorías:** [Embarazo y Obstetricia](#), [Test Rápidos](#)

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### **PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO**

Prueba Rápida de Embarazo (GCH) de Sensibilidad mejorada en Casete es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de gonadotropina coriónica humana en orina o suero o plasma para ayudar en la detección temprana del embarazo.



## Descargar IFU Test Embarazo HCG 10 mIU/ml Akratest

### Principio

La Prueba Rápida de Embarazo (GCH) de Sensibilidad mejorada en Casete es una prueba rápida de inmunoensayo cromatográfico para la detección cualitativa de gonadotropina coriónica humana en orina suero o plasma para ayudar en la detección temprana del embarazo. La prueba utiliza dos líneas para indicar los resultados. La prueba utiliza una combinación de anticuerpos que incluyen un anticuerpo monoclonal GCH para detectar selectivamente los niveles elevados de GCH. La línea de control está compuesto de anticuerpos policlonales de cabra y partículas de oro coloidal. El ensayo se realiza agregando una muestra al casete de prueba y observando la formación de líneas coloreadas. La muestra migra por acción capilar a lo largo de la membrana para reaccionar con el conjugado de color.

Las muestras positivas reaccionan con el conjugado de color anticuerpo específico de GCH para formar una línea de color en la zona de la prueba de la membrana. La ausencia de esta línea de color sugiere un resultado negativo. Para servir como control del procedimiento, una línea coloreada aparecerá siempre en la zona de control indicando que un volumen apropiado de muestra se ha añadido, y ha producido reacción de la membrana.

### Materiales Suministrados

- Pruebas en casete
  - Cuentagotas
- Instrucciones de uso

### Materiales Requeridos no Suministrados

- Contenedor para recogida de muestra
  - Cronómetro

**[DESCARGAR IFU TEST EMBARAZO HCG 10 MLU/ML AKRATEST](#)**



Test embarazo HCG 10 mIU/ml en suero, plasma y orina,  
casete  
<https://www.akralab.es/producto/test-embarazo-hcg-casete/>



Test embarazo HCG 10 mIU/ml en suero, plasma y orina,  
casete  
<https://www.akralab.es/producto/test-embarazo-hcg-casete/>