

## TEST FENTANILO FYL 20 NG/ML EN ORINA, TIRAS

**143,85€ I.V.A. no incluido**



Una prueba rápida de tira reactiva para la detección cualitativa del norfentanilo, un metabolito del fentanilo (FYL) en la orina humana, con una concentración de corte de 20ng/mL

Presentación: Caja 50 tests

---

**SKU:** 265602DFY101

**Categorías:** [Drogas](#), [Test Rápidos](#)

**Etiquetas:** [akratest fentanilo](#), [test akratest](#), [test fentanilo akratest](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL Y DIAGNÓSTICO IN VITRO

El Prueba Rápida FYL en Tira (orina) es un ensayo inmunocromatográfico rápido que permite la detección cualitativa del norfentanilo, un metabolito del fentanilo. Es un analgésico narcótico potente, el abuso de este causa acostumbamiento o adicción. Es un agonista opiáceo mu primario. El Remifentanilo también se usa como complemento a los anestésicos generales, y como un anestésico por inducción y mantenimiento. Este ensayo solo proporciona un resultado analítico preliminar. Se debe utilizar un método químico alternativo para obtener un resultado analítico confirmado. Se prefiere como método de confirmación la cromatografía de gases/espectrometría de

masas (GC/MS). La consideración clínica y el juicio profesional debe aplicarse a cualquier resultado de drogas de abuso, particularmente cuando se utilizan resultados positivos preliminares.

Resultados en sólo 10 minutos.

## Descargar IFU Test Tiras Fentanilo Akratest

### Principio

El Prueba Rápida FYL en Tira (orina) es un inmunoensayo basado en el principio de unión competitiva. Las drogas que pueden estar presentes en la muestra de orina compiten contra el conjugado de la droga por los sitios de unión en el anticuerpo. Durante la prueba, la muestra de orina migra hacia arriba por medio de la acción capilar. Si el fentanilo está presente en la muestra de orina por debajo de 20 ng/mL, no saturará los sitios de unión de las partículas recubiertas de anticuerpos en el dispositivo de prueba. Las partículas recubiertas de anticuerpo se capturarán por el conjugado de FYL inmovilizado y una línea visible de color aparecerá en el área de la línea de la prueba. La línea de color no aparecerá en la zona de la línea de prueba si el nivel de fentanilo supera los 20 ng/mL porque saturará todos los sitios de unión de los anticuerpos anti-FYL.

Una muestra de orina positiva para la droga no generará una línea de color en el área de línea de prueba, mientras que una muestra de orina negativa para la droga o una muestra que contenga una concentración de la droga menor al corte sí generará una línea en el área de la línea de prueba. Para que sirva de procedimiento de control, siempre aparecerá una línea de color en el área de línea de control, indicando que se añadió el nivel adecuado de muestra y la membrana se humedeció.

### Materiales incluidos en el kit

- Pruebas en tiras
- Instrucciones de uso

### Materiales Requeridos no Suministrados

- Contenedor para recogida de muestra
- Cronómetro